



**Gebrauchsanleitung für den
KLECK Leckschutz**

Bitte beachten Sie für die ordnungsgemäße Anwendung des Kleck Leckschutz die folgenden Hinweise:

Inhaltsverzeichnis:

1. Allgemeine Informationen
2. Anwendungsbereiche
3. Lieferumfang und Funktion
4. Größenermittlung - Messen mit dem Maßband
5. Individuelle Größenverstellung
6. Das richtige Anlegen
7. Pflegehinweise
8. Warnhinweise

1. Allgemeine Informationen

Jeder Hundebesitzer versucht das Leben seines Hundes so angenehm wie möglich zu gestalten. Leider sind Erkrankungen bzw. Operationen, die im Nachgang eine Weiterbehandlung benötigen, nicht immer zu verhindern. Nach einer Operation, einer Entzündung im Analbereich, einem Ekzem oder weiteren Beschwerden im hinteren Rumpfbereich entsteht bei dem Hund das Verlangen die betroffene Stelle zu lecken oder zu beißen. Dieses Verhalten führt dazu, dass der Heilungsprozess gestört wird, da immer wieder Bakterien in die Wunde eingebracht werden. Der Kleck Leckschutz stellt eine verträgliche und komfortable Alternative zu dem handelsüblichen Trichterschutz dar.

Der Kleck Leckschutz für Hunde verhindert das Erreichen des hinteren Rumpfbereiches mit der Schnauze. Das Tier gewöhnt sich in der Regel innerhalb kürzester Zeit an das Geschirr.

Mit unserem patentierten Produkt kann der Hund wie gewohnt essen, schlafen und spielen*.

- Die optische sowie die akustische Wahrnehmung des Hundes werden nicht beeinträchtigt
- Die Bewegungskoordination bleibt vollständig erhalten
- Die Bewegungsfreiheit bleibt erhalten


*sofern der behandelnde Tierarzt nichts anderes empfiehlt

Bei chronischen oder wiederkehrenden Krankheitsbildern ist das Tragen von Kleck, aufgrund des hohen Tragekomforts, auch über einen längeren Zeitraum möglich.

Das Produkt wurde in Kooperation mit deutschen Tierärzten entwickelt und wird in Handarbeit aus hochwertigen Materialien hergestellt.

2. Anwendungsbereiche

Die rote Markierung zeigt den Bereich, der durch den Kleck Leckschutz mit der Schnauze nicht mehr erreicht werden kann.

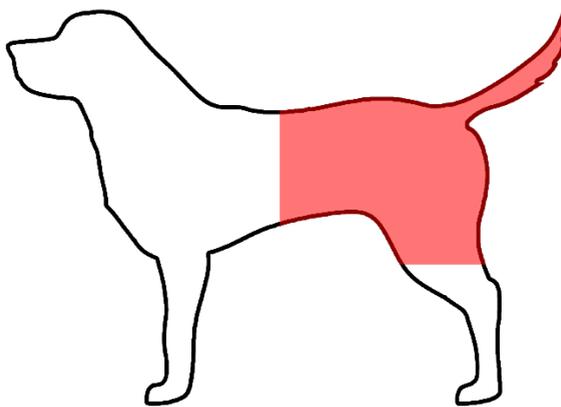

3. Lieferumfang und Funktion

Der Kleck Leckschutz wird vormontiert geliefert und besteht aus einem Halsgurt, einem längeren Rumpfgurt, 2 ummantelten Aluminiumleisten und einem Sechskantschlüssel zum individuellen Einstellen des Geschirrs.

Das Geschirr wird am Hals umgelegt, die Aluminiumleisten an den Seiten des Hundes entlanggeführt und mit dem Rumpfgurt am Ende der Rippen fixiert. Versucht der Hund nun seinen hinteren Rumpfbereich zu erreichen, drückt er die Leisten durch die Drehbewegung in seine Flanke und schiebt diese dadurch zur Seite. Das Erreichen des betroffenen Bereiches ist somit nicht möglich.

Erhältlich sind die Größen XS, S, M, L und XL.


4. Größenermittlung - Messen mit dem Maßband

Für die optimale Funktionalität wird das Vermessen des Hundes empfohlen.

Rumpflänge ermitteln:

Zum Vermessen muss der Hund stehen (siehe Zeichnung). Von Punkt A, Vorderrand des Schulterblattes, wird nun mit Hilfe eines Maßbandes der Abstand bis zur Mitte der letzten Rippen Punkt B, (siehe Zeichnung) gemessen.

Die empfohlene Größe kann nun anhand der folgenden Tabelle bestimmt werden:

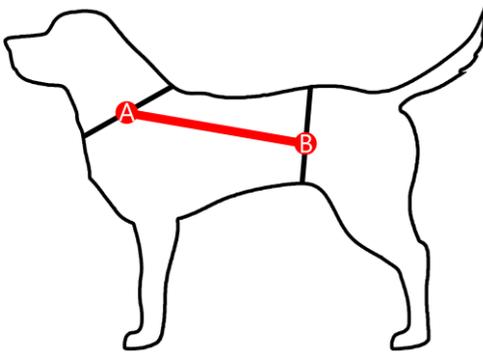

Größe	Ermittelte länge
XS	22cm bis 25cm
S	26cm bis 31cm
M	32cm bis 39cm
L	40cm bis 51cm
XL	52cm bis 63cm

4.1 Verstellbereich der vormontierten Gurte

Größe	Hals-Gurt	Rumpf-Gurt
XS	28cm bis 40cm	31cm bis 49cm
S	31cm bis 56cm	44cm bis 70cm
M	31cm bis 56cm	47cm bis 81cm
L	50cm bis 70cm	52cm bis 90cm
XL	53cm bis 83cm	52cm bis 90cm

Benötigen Sie andere Maße der Gurte, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.




5. Individuelle Größenverstellung

Kleck ist bereits auf mittlerer Einstellung vormontiert, bei Bedarf kann jedoch die Schienenlänge, Gurtlänge und Gurtposition individuell angepasst werden.

Verstellung:


1. Ummantelung entfernen
2. Schrauben mit dem mitgelieferten Werkzeug lösen
3. Neue Verschraubungsposition wählen
4. Schrauben mit dem mitgelieferten Werkzeug befestigen
5. Ummantelung anbringen
6. Ummantelung mittig mit beiden Händen umgreifen und dehnen, um die Ummantelung zu entspannen

Einstellungsmöglichkeiten der Schienen innerhalb einer Größe:

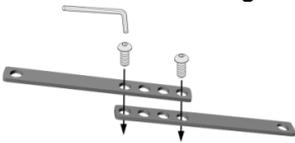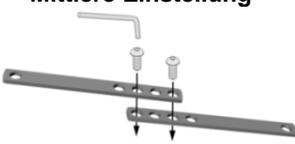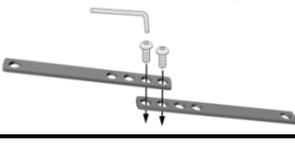Montage	XS	S	M	L	XL
Kleinste Einstellung 	22 cm bis 23 cm	26 cm bis 27,5 cm	32 cm bis 34 cm	40 cm bis 43 cm	52 cm bis 55,5 cm
Mittlere Einstellung 	23 cm bis 24 cm	27,5 cm bis 29 cm	34 cm bis 36 cm	43 cm bis 46 cm	55,5 cm bis 59 cm
Große Einstellung 	24 cm bis 25 cm	29 cm bis 31 cm	36 cm bis 39 cm	46 cm bis 51 cm	59 cm bis 63 cm

6. Das richtige Anlegen

Legen Sie das Geschirr ausgebreitet auf den Boden mit den Druckknöpfen nach oben. Die Vorderläufe müssen in dem rechteckigen Bereich positioniert werden, bitte beachten Sie, dass die überstehenden Stangenenden bei dem Hund nach hinten zeigen (rot markiert). Im Anschluss schließen Sie die beiden Gurte auf dem Rücken.

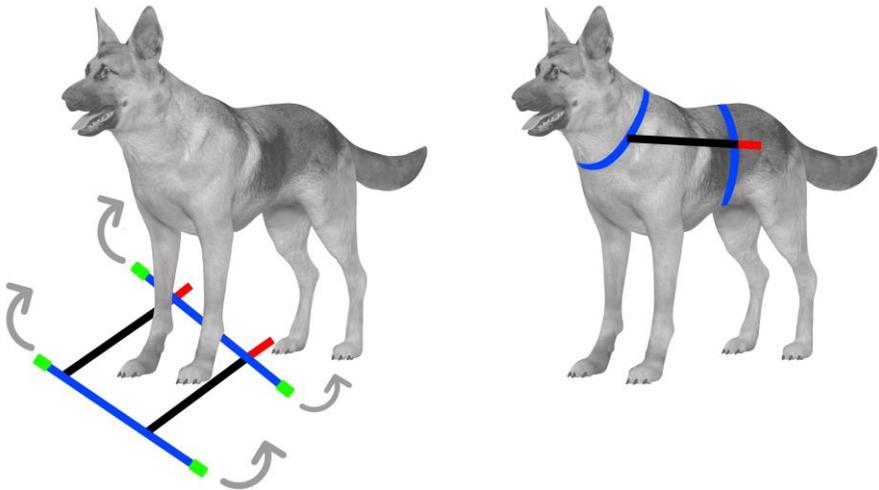

Den Halsgurt gleichmäßig an beiden Seiten der Schnallen enger ziehen. Der Halsgurt sollte so anliegen, dass die Stangen entlang der Schulterblätter verlaufen und der Hund frei atmen kann. Den Rumpfgurt so weit enger ziehen, dass ein Verdrehen des Geschirrs verhindert wird. Dabei ist drauf zu achten, dass der Gurt den Hund nicht einschnürt. Nun sollte der Hund die zu schützenden Stellen mit der Schnauze nicht mehr erreichen können. Sollte der Hund dies dennoch schaffen, prüfen Sie bitte die Einstellung. (Punkt 5)

7. Pflegehinweis

Die abnehmbare Ummantelung aus Neopren kann bei Bedarf mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei stärkerer Verschmutzung kann die Ummantelung mit einer Waschtemperatur von maximal 30 Grad im Wollprogramm gewaschen werden. Wir empfehlen ein mildes Flüssigwaschmittel. Da sich die Reinigungsmittel in dem Stoff festsetzen können, sollte die Ummantelung ein weiteres Mal ohne Zugabe von jeglichen Mitteln gespült werden. Von Schleuderwaschgängen wird abgeraten.

8. Warnhinweise

- Keine Leine am Kleck Leckschutz anbringen
- Hund mit angelegtem Kleck Leckschutz nicht unbeaufsichtigt lassen
- Falls der Hund die Problemstelle doch erreicht, bitte Position und die individuelle Einstellung (Punkt 5) des Leckschutzes prüfen

Kleck Leckschutz

Die Trichteralternative für Hunde

Folge uns auf Social-Media



www.social.kleck-shop.com

WWW.KLECK-SHOP.COM

info@kleck-shop.com

KLECK GmbH & Co.KG
Dorfbauerschaft 6
48317 Drensteinfurt

Telefon: 02387 / 9190188
Mobil: 0160 / 741 4456
Fax: 02387 / 919 151

Amtsgericht: Münster
HRA 11357
Stnr: 304/5937/4342
UST- IdNr.: DE 34 5754 181

Persönlich haftende
Gesellschafter: Kleck GmbH
Sitz der Gesellschaft:
Drensteinfurt
Amtsgericht: Münster
HRB: 19612
Stnr: 304/5937/1479